

使用説明書

CIBA  VISION™

FreshLook[®]Care 10 min

フレッシュルックケア 10ミニッツ

医薬部外品

洗浄・すすぎ・消毒・保存

販売名:ソロケアソフト

- ご使用前に必ずこの使用説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。
- 本剤はソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものですが、この使用説明書に記載された使用方法や注意事項に従って正しく使用しないと、洗浄・消毒が不完全となり、眼の感染症等の原因となったり、それが進行すると視力を失う危険性も生じます。この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 現在ご使用中のソフトコンタクトレンズの取扱いについては、その使用説明書もよくお読みください。

ソフトコンタクトレンズは素材の中に水分を含んでいます。装用中に涙に含まれるタンパク質や脂質などがレンズに付着し、その汚れを放置しておくことで細菌やカビなどの繁殖をまねき、眼の感染症を引き起こす原因となることがあります。ソフトコンタクトレンズを安全に使用するには、毎日の洗浄、すすぎ、消毒を正しく行うことが必要です。

使用方法

ソフトコンタクトレンズを取扱う前に、必ず石けんで手指をよく洗います。



ステップ 1 / 洗浄

目からはずしたソフトコンタクトレンズを手のひらにのせます。ソフトコンタクトレンズ表面に本剤を3滴以上滴下し、各面20回以上ずつていねいにこすり洗いをします。



ステップ 2 / すすぎ

こすり洗いしたソフトコンタクトレンズの両面を本剤で10秒間以上すすぎます。



ステップ 3 / 消毒・保存

レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全にひたし、ケースのフタをしっかりと締めます。

そのまま10分以上放置すると消毒が完了します。消毒後、レンズを本剤ですすいしてから装用します。

- レンズを取り出した後のケース内の液は捨て、毎日新しい液を使用してください。
- レンズを取り出した後のレンズケースは、空にして、本剤でケース内をよくこすり洗いをしてからすすぎ、自然乾燥させてください。
- 1本の消毒液を使いきる毎に、同梱の新しいレンズケースに必ず取り替えてください。

タンパク除去処理

タンパク除去剤による洗浄が必要な場合には、別売のタンパク除去剤(ユニザイム)を用いて処理してください。詳しくは、製品の取扱説明書をご参照ください。

使用上の注意

1. 守らなければならないこと

- (1) この使用説明書に記載してある使用方法を厳守してください。使用方法を誤ると消毒が不完全となり、眼の感染症や、角膜潰瘍などの重い眼障害の原因となることもあります。また、それを治療せずに放置すると失明してしまうこともあります。
- (2) レンズを取扱う前には、必ず手指を石けんで洗い、よくすすいでください。
- (3) 定められた消毒時間（10分以上）を必ず守ってください。消毒が終わっていない状態で、レンズを装用しないでください。
- (4) レンズを取り出した後のケースは、必ず空にして新しい液ですすぎ、自然乾燥させておいてください。清潔なレンズケースを使用しないと、レンズケース内で雑菌が繁殖し、眼へ感染し、角膜潰瘍等の重い眼障害の原因になることもあります。
- (5) 目に異常を感じなくても、指示された定期検査を必ず受けてください。
- (6) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

2. してはいけないこと

- (1) 本剤はソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存にのみ使用し、飲まないでください。
- (2) 本剤の容器の先にコンタクトレンズや指先が触れると、雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがあるのでご注意ください。また混濁したものや変色したものは使用しないでください。
- (3) 本剤は煮沸消毒に使用しないでください。また、他のソフトコンタクトレンズ用消毒剤と混ぜて使用しないでください。
- (4) レンズを取り出した後のケース内の液は必ず捨て、毎回新しい薬液を使用してください。
- (5) 一度出した液を再びボトル容器に戻さないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

3. 相談すること

- (1) 次の人は使用前に**眼科医**にご相談ください。
 - a) 今までに目のアレルギー症状（例えば、目の充血、かゆみ、はれ、発疹、発赤等）を起こしたことがある人。
 - b) 医師の治療を受けている人。
- (2) 使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。
- (3) 本剤を使用したソフトコンタクトレンズを装用中、または装用後に、痛み、充血、流涙、目やに、ごろごろ感（または異物感）、かすみ目、かわき目、まぶしさなどの異常を感じた場合には、直ちにレンズを外し、**眼科医**に相談してください。そのまま装用し続けると、眼の感染症や、角膜潰瘍などの重い眼障害につながる可能性があります。

<効能・効果>

ソフトコンタクトレンズ（グループⅠ～グループⅣ）の消毒

<用法及び用量>

1. レンズの表面に本剤を3滴以上滴下し、各面20回以上ずついいねいにこすり洗いをします。
2. 洗ったレンズの両面を本剤で10秒間以上すすぎます。
3. レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸し、ケースの蓋をしっかりと締め、そのまま10分以上放置します。

<有効成分>

1mL中に塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有

<配合成分>

界面活性剤（ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール）、安定化剤、緩衝剤、等張化剤、pH調整剤

<表示指定成分>

エデト酸塩

<保管及び取り扱い上の注意>

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 使用後はキャップをしっかりと締めて、直射日光を避け、室温で保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、消毒液を他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 消毒液の容器を開封したら、すみやかに使用してください。

ホームページ www.lenscare.jp

製造販売 **チバビジョン株式会社**
東京都品川区東品川2-2-24

お問い合わせ・ご相談は、チバビジョンダイヤルまで

 **0120-389103**

ミワクノヒトミ

24時間・365日対応

通話内容は弊社サービスの向上のために録音させて頂いています

CVFLC201004